



LBMMS DU DIACONAT REFERENTIEL DES EXAMENS

Laboratoire multisite
de biologie médicale du Diaconat

Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat



Fondation
de la maison du
Diaconat
de Mulhouse

Ce référentiel présente uniquement les examens sanguins analysés au sein du Laboratoire de Biologie Médicale Multi-site (LBMMS) du Diaconat.

Pour tout examen ne figurant pas dans ce référentiel, nous vous invitons à prendre contact avec notre laboratoire afin de disposer de toutes les informations utiles à la bonne réalisation des examens, avant de nous transmettre l'échantillon concerné.

Conservation des échantillons primaires au laboratoire :

Les échantillons sanguins et urinaires sont conservés 24 heures au laboratoire.

En fonction des analyses demandées, les échantillons primaires peuvent être conservés durant un an (à < -20°C) pour :

- les sérologies infectieuses
- les marqueurs tumoraux
- β HCG
- PSA totale et libre

Les seringues de gaz du sang sont immédiatement détruites après analyse.

Légende	
	Alerte ! Un commentaire nécessite votre attention.
	À réfrigérer (2°C-8°C) ou congeler (-20°C)
NA	Non Applicable
DF	Lieu d'exécution = Diaconat Fonderie
DR	Lieu d'exécution = Diaconat Roosevelt
DC	Lieu d'exécution = Diaconat Colmar
HCC	Hôpitaux Civils de Colmar
EXAMEN REALISE EN GARDE ?	Examens réalisés aux heures d'ouverture du laboratoire et en garde (24h/24 7J/7)
GARDE BAC	Examens réalisés aux heures d'ouverture du laboratoire et en période de « Garde de bactériologie » (horaires garde du secteur microbiologie : dimanches et jours fériés, le matin uniquement)

NB : les modifications par rapport à la version précédentes sont indiquées par un trait vertical dans la marge

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
ACE (ANTIGENE CARCINO EMBRYONNAIRE)	HL						24H à 15°C-25°C	6 mois -20°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0
ACIDE URIQUE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Enzymatique	DF/DC	J0
Anticorps anti thyroglobuline			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	2 mois -20°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0
Anticorps anti TPO			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	12 mois -20°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0
ACTIVITE ANTI-XA SOUS HBPM				CIT			6H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Remplissage recommandé : >90 % Remplissage accepté : ≥80% Préciser le traitement anticoagulant, l'heure de l'injection (Pour toute demande d'activité anti-Xa sous un autre traitement que HBPM : examen sous-traité)	OUI	Chromogénie	DF/DC	J0
ALBUMINE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Immunoturbidimétrie	DF/DC	J0
ALCOOLEMIE (ETHANOL)	HL						4H à 15°C-25°C ou 2 semaines à 15°C-25°C si acheminé centrifugé (sous-traitance)	Rajout dans le délai d'acheminement	Lors de la prise de sang, ne pas désinfecter à l'alcool. Tube HL pour les sites de Mulhouse .	OUI	Enzymatique	DF	J0
AFP (ALPHA FOETO-PROTEINE)	HL						12H à 15°C-25°C	6 mois -20°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
AMH (HORMONE ANTI-MULLERIENNE)	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0
AMYLASE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	Interférences : hémolyse	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
BETA-HCG	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	Indiquer la date des dernières règles	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0
BICARBONATES (RA)	HL						8H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Enzymatique	DF/DC	J0
BILIRUBINE CONJUGUEE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
BILIRUBINE LIBRE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
CA 125	HL						8H à 15°C-25°C	6 mois à -20°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
CA 15-3	HL						24H à 15°C-25°C	3 mois à -20°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
CA 19-9	HL						24H à 15°C-25°C	3 mois à -20°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
CALCIUM	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
CALCIUM IONISE	HL					Seringue héparinée	30 min maximum à 15°C-25°C ou 1H sur glace Déposer idéalement le plus rapidement possible	NA	Sur sang veineux ou artériel. Ne pas placer le prélèvement directement en contact avec la glace.	OUI	Potentiométrie	DF/DC	J0
CAPACITE TOTALE DE SATURATION DE LA TRANSFERRINE (CTF)	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	Synonyme : saturation de la sidérophiline	OUI	Calcul du coefficient de saturation	DF/DC	J0

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
CHLORE	HL						8H -à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Potentiométrie indirecte	DF/DC	J0
CHOLESTEROL TOTAL	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	Prélèvement à Jeun (10H)	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
CHOLESTEROL HDL	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	Prélèvement à Jeun (10H)	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
CMV (CYTOMEGALOVIRUS)			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	3 mois -20°C		NON	Chimiluminescence	DF	J0-J1
COOMBS DIRECT					EDTA		12H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Mentions obligatoires : nom de naissance, prénom, date de naissance et nom marital, sexe	OUI	Technique manuelle: test direct à l'antiglobuline	DF/DC	J0
CPK (CREATININE PHOSPHO KINASE)	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C		OUI	Enzymatique	DF/DC	J0
CREATININE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Enzymatique	DF/DC	J0
CRP (PROTEINE C REACTIVE)	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Immunoturbidimétrie	DF/DC	J0
DDI (D-DIMERES)				CIT			24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Remplissage recommandé :>90 % (jusqu'au trait) Remplissage accepté : ≥80%	OUI	Immunoturbidimétrie	DF/DC	J0
EBV (EPSTEIN-BAAR VIRUS)			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	3 mois -20°C		NON	Chimiluminescence	DF	J0-J1
FER SERIQUE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
FERRITINE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
FIBRINOGENE				CIT			24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Remplissage recommandé : >90 % (jusqu'au trait) Remplissage accepté : ≥80%	OUI	Chronométrie	DF/DC	J0
FILAIRES					EDTA		24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	 Prélever à 12H pour la recherche de Loa Prélever à 23H-minuit pour la recherche de filaires lymphatiques	OUI	Microscopie optique : frottis mince et goutte épaisse (filarémie)	DF	J0
FOLATES	HL						8H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement à 15°C-25°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0
FSH	HL						8H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
GAMMA-GLUTAMYL-TRANSFERASE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Enzymatique	DF/DC	J0
GAZ DU SANG	HL					Seringue héparinée	30 min maximum à 15°C-25°C ou 1H sur glace Déposer idéalement le plus rapidement possible	NA	 Préciser les conditions d'oxygénation Précisez la température corporelle Ne pas placer la seringue de gaz du sang directement en contact avec la glace La prescription comporte par défaut : pH, pCO2, pO2, CO2 total, oxyHb, Hb totale, SaO2	OUI	Potentiométrie	DF/DC	J0
GLUCOSE	HL					Fna	Tube HL : 2H à 15°C-25°C Tube Fna : 24H à 15°C-25°C	Tube HL : 8H à 15°C-25°C Tube Fna : 24H à 15°C-25°C	Prélèvement à Jeun (10H) Domicile : Tube Fluorure de Sodium (Fna= tube gris)	OUI	Enzymatique	DF/DC	J0
GROUPE SANGUIN					EDTA		12H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Mentions obligatoires : nom de naissance, prénom, date de naissance et nom marital, sexe	OUI	Hémagglutination aux hématies sensibilisées aux AC monoclonaux	DF/DC	J0
HBA1C					EDTA		24h à 15°C-25°C	24 H à 2°C-8°C	/	OUI	Immunoturbidimétrie	DF	J0-J1
HEMATIES FCETALES (TEST DE KLEIHAUER)					EDTA		24H à 15°C-25°C OU 72H à 2° C-8°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Technique manuelle Lecture au microscope	DF	J0-J1

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER					CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU		
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA							Autre	
HEMOCULTURES						Autre	 <p>Flacons BACTEC Aérobie / Anaérobie</p>	12H à 15°C-25°C (acceptable jusqu'à 24h)	<p>Flacon conservé jusqu'à la sortie du résultat définitif en cas de positivité</p> <p>Respecter le volume de sang optimal : 8-10 ml/flacon</p> <p>Prélèvement total de 40 à 60 ml de sang en un seul prélèvement chez l'adulte* 4 à 6 flacons correctement remplis (parité de flacons entre anaérobie et aérobie, ex : 2+2 ou 3+3).</p>	NON	Culture automatisée BD-BACTEC	DR	<p>Dès culture positive</p> <p>Ou après 48h d'incubation puis après 5j d'incubation en cas de cultures stériles</p> <p>*Exceptions : suspicion d'endocardite infectieuse après 48h d'incubation puis après 15 j d'incubation</p>
HEMOCULTURES						Autre	 <p>Flacon Pédiatrique BACTEC Peds Plus</p>	12H à 15°C-25°C (acceptable jusqu'à 24h)	<p>Flacon conservé jusqu'à la sortie du résultat définitif en cas de positivité</p> <p>Prélever un flacon unique spécifique BD BACTEC TM Peds Plus/F Respecter le volume de sang optimal : 1 à 3 ml selon le poids de l'enfant <i>Se référer au protocole de prélèvement des hémocultures</i></p>	NON	Culture automatisée BD-BACTEC	DR	<p>Dès culture positive</p> <p>Ou après 48h d'incubation puis après 5j d'incubation en cas de cultures stériles</p> <p>*Exceptions : suspicion d'endocardite infectieuse après 48h d'incubation puis après 15 j d'incubation</p>

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
HEPATITE B : AC totaux anti-HBc			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	3 mois -20°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0-J1
HEPATITE B : AC anti-HBs			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	3 mois -20°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0-J1
HEPATITE B : Antigène HBs			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	6 mois -20°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
HEPATITE C : AC anti-VHC			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	3 mois -20°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0-J1
HIV : Test Combo Ag p24 et Ac anti-VIH1/2			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	3 mois -20°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0-J1
INR (TAUX DE PROTHROMBINE-TEMPS DE QUICK)				CIT			24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	 Remplissage recommandé :>90 % (jusqu'au trait) Remplissage accepté : ≥80%	OUI	Chronométrie	DF/DC	J0
LACTATES (ACIDE LACTIQUE)	HL					Seringue héparinée	30 min maximum à 15°C-25°C ou 1H sur glace Déposer idéalement le plus rapidement possible	NA	 Ne pas placer le prélèvement directement en contact avec la glace. Recommande prélèvement sans garrot et en repos au lit	OUI	Potentiométrie	DF/DC	J0
LDH (LACTATE DESHYDROGENASE)	HL						2H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Domicile déconseillé. Interférences : hémolyse Sur rendez-vous au laboratoire	OUI	Spectrophotométrie	DF	J0-J1
LH	HL						8H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
LIPASES	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
MAGNESIUM	HL						8H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Colorimétrie	DF	J0-J1
NT-PROBNP <i>(Peptide natriurétique cérébral n terminal)</i>	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0
NUMERATION FORMULE SANGUINE					EDTA		24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Impédancemétrie Cytométrie en flux	DF/DC	J0
ŒSTRADIOL (17 BETA-ŒSTRADIOL)	HL						8H à 15°C-25°C	24h à 15°C – 25°C	Préciser la date des dernières règles Préciser le traitement hormonal	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
OSMOLARITE SANGUINE CALCULEE	HL						2H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Calcul	DF/DC	J0
PALUDISME (RECHERCHE DE PARASITES SANGUINS)					EDTA		< 1H à 15°C-25°C	NA	URGENT, prévenir le laboratoire Prélever 1-tube  Préciser les renseignements cliniques (fièvre, contexte, voyage, traitement...) Résultat dans max 4H suivant le prélèvement En absence d'une antériorité récente	OUI	Frottis - Goutte épaisse Immunochromatographie	DF DC examen sous-traité aux HCC	J0
PARATHORMONE	HL						9H-à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J2
PHOSPHATASES ALCALINES	HL						24H à 15°C-25°C	24h à 15°C – 25°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
PHOSPHORE	HL						4H à 15°C-25°C	24H à 2°C-8°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
PLAQUETTES				CIT	EDTA		24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	 Si demande de plaquettes sur tubes citrate associé systématiquement un tube EDTA violet pour contrôle	OUI	Impédancemétrie Cytométrie en flux	DF/DC	J0
POTASSIUM	HL						4H -à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Préciser si prélèvement sans garrot Interférences : hémolyse	OUI	ISE indirecte	DF/DC	J0

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
PREALBUMINE	HL						8H à 15°C-25°C	24 H 15°C-25°C	/	OUI	Immunoturbidimétrie	DF/DC	J0-J1
PROCALCITONINE (PCT)	HL						8H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0
PROGESTERONE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0
PROLACTINE	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	Prélèvement de préférence chez un sujet reposé non stressé. Pas de recommandations strictes pour le prélèvement en ce qui concerne: l'heure du prélèvement, le jour du cycle, la distance par rapport aux repas	OUI	Chimiluminescence	DF	J0
PROTEINES TOTALES	HL					—	24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Colorimétrie	DF/DC	J0
PSA LIBRE	HL						8H à 15°C-25°C	3 mois à -20°C	Eviter le dosage après une stimulation de la prostate (massages, sport, biopsie, échographie etc...) minimum 10 jours.	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
PSA TOTAL	HL						8H à 15°C-25°C	6 mois à -20°C		OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
RAI					EDTA		12H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Mentions obligatoires : nom de naissance, prénom, date de naissance et nom marital, sexe	OUI	Hématies sensibilisées aux anti-globulines humaines	DF/DC	J0
RETICULOCYTES					EDTA		24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Cytométrie en flux	DF/DC	J0-J1
RUBEOLE : SEROLOGIE IgG			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	3 mois à -20°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0-J1
SCHIZOCYTES (RECHERCHE)					EDTA		24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Rajout d'une NFP systématiquement si non demandé.	OUI	Examen direct (microscopie optique)	DF/DC	J0
SODIUM	HL						8H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Interférences : hémolyse	OUI	ISE indirecte	DF/DC	J0

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
SYPHILIS (<i>Ac anti-Treponema pallidum</i>)			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	12 mois à -20°C	/	NON	Test tréponémique = Chimiluminescence	DF	J0-J1
T3 libre (<i>triiodothyronine libre</i>)	HL						24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0-J1
T4 libre (<i>thyroxine libre</i>)	HL						24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0-J1
TAUX DE PROTHROMBINE (Temps de Quick-INR)				CIT			24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Remplissage recommandé : > 90 % (= jusqu'au trait) Remplissage accepté : ≥ 80% Préciser le traitement	OUI	Chronométrie	DF/DC	J0
TCA <i>Temps de Céphaline avec activateur</i> TCK <i>Temps de Céphaline Kaolin</i> AVEC TRAITEMENT HNF				CIT			2H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement		OUI	Chronométrie	DF/DC	J0
TCA ou TCK SANS TRAITEMENT HNF				CIT			6H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement		OUI	Chronométrie	DF/DC	J0
TEMPS DE QUICK (Taux de prothrombine-INR)				CIT			24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement		OUI	Chronométrie	DF/DC	J0
TOXOPLASMOSE : sérologie IgG + IgM			SEC GEL				24H à 15°C-25°C	3 mois à -20°C	/	NON	Chimiluminescence	DF	J0-J1
TRANSAMINASE ALANINE AMINO-TRANSFERASES (ALAT)	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0
TRANSAMINASE ASPARTATE AMINO-TRANSFERASES (ASAT)	HL						24H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Spectrophotométrie	DF/DC	J0

PRELEVEMENTS SANGUINS

EXAMEN	TUBE A PRELEVER						CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (durée maximale entre le prélèvement et le dépôt au laboratoire)	DELAI DE PRESCRIPTION DES EXAMENS (durée maximale entre le dépôt au laboratoire et la réalisation de l'analyse)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
	HL	SEC	SEC GEL	CIT	EDTA	Autre							
TRANSFERRINE (SIDEROPHILINE)	HL						24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Immunoturbidimétrie	DF/DC	J0-J1
TRIGLYCERIDES	HL						24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	Prélèvement à Jeun (10H)	OUI	Enzymatique	DF/DC	J0
TROPONINE	HL						8H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0
TSH	HL						8H à 15°C-25°C	24H à 15°C-25°C	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0
UREE	HL						24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Enzymatique	DF/DC	J0
VITAMINE B12	HL						24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Chimiluminescence	DF/DC	J0-J1
VITAMINE D	HL						24H à 15°C-25°C	Rajout dans le délai d'acheminement	/	OUI	Chimiluminescence	DF	J0-J1
VITESSE DE SEDIMENTATION					EDTA		4H à 15°C-25°C	24H à 2°C-8°C	Le tube doit rester capuchonné entre le prélèvement et la réalisation du test.  Les tubes pédiatriques ne peuvent pas être utilisés.	OUI	Photométrie capillaire	DF	J0-J1

PRELEVEMENTS D'URINES - MICROBIOLOGIE ET CYTOLOGIE

EXAMEN	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
ALBUMINE		24H à 15°C-25°C Sauf Glucose urinaire : 2H à T°C ambiante ou 4H à 2°C-8°C	Sur échantillon Utiliser un pot <u>SANS</u> conservateurs.	OUI	Immunoturbidimétrie	DF	J0-J1
CHLORE					ISE indirecte		
CREATININE					Enzymatique		
GLUCOSE					Enzymatique		
MICROALBUMINE					Immunoturbidimétrie		
POTASSIUM					ISE indirecte		
PROTEINES TOTALES					Spectrophotométrie		
SODIUM					ISE indirecte		
ALBUMINE	Urines de 24H  	Bidon : 2H à 2°C-8°C Tube beige : 24H à 15°C-25°C Sauf Glucose urinaire : 2H à T°C ambiante ou 4H à 2°C-8°C	Sur urines de 24H Conserver les urines à entre 2°C et 8°C entre chaque miction. Utiliser un pot <u>SANS</u> conservateurs.	OUI	Immunoturbidimétrie	DF	J0-J1
CHLORE					ISE indirecte		
CREATININE					Enzymatique		
GLUCOSE					Enzymatique		
MICROALBUMINE					Immunoturbidimétrie		
POTASSIUM					ISE indirecte		
PROTEINES TOTALES					Spectrophotométrie		
SODIUM					ISE indirecte		

PRELEVEMENTS D'URINES - MICROBIOLOGIE ET CYTOLOGIE

EXAMEN	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
ANTIGENURIE LEGIONELLA PNEUMOPHILA	Flacon stérile avec ou sans conservateurs 	24H à 15°C-30°C 14 jours à 2°C-8°C	EXAMEN URGENT	OUI	Immuno-chromatographie	DF/DC	J0
ANTIGENURIE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	OU 	24H à 15°C-25°C 14 jours à 2°C-8°C	EXAMEN URGENT (uniquement sur le site DC)	OUI		Immuno-chromatographie	DC
COMPTE D'ADDIS	Bidon 500 ml 	2H à 15°C-25°C ou 24H à 2°C-8°C	Prélever la totalité des urines pendant 3h dans le flacon fourni.	OUI (GARDE BAC)	Cytologie urinaire automatisée	DR	J0 DC J0-J1
CULOT URINAIRE/ SEDIMENT URINAIRE	Flacon stérile sans conservateur 	2H à 15°C-25°C ou 24H à 2°C-8°C	Volume minimum souhaitable : 2 mL	OUI (GARDE BAC)	Cytologie urinaire automatisée	DR	J0 DC J0-J1
	Flacon stérile avec conservateur 	24H à 15°C-25°C	Tube avec conservateur remplir jusqu'au trait.	OUI (GARDE BAC)	Cytologie urinaire automatisée	DR	J0 DC J0-J1

PRELEVEMENTS D'URINES - MICROBIOLOGIE ET CYTOLOGIE

EXAMEN	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
CHLAMYDIAE TRACHOMATIS, + NEISSERIA GONORRHOEAE, (=GONOCOQUE) + MYCOPLASMES + TRICHOMONAS VAGINALIS RECHERCHE PAR PCR	Flacon stérile sans conservateur 	48h à 15-25°C 1 semaine à + 4°C	Urines : 1^{er} jet urines (20 à 60 ml) à partir des urines de la nuit ou minimum 2 h après la dernière miction Désinfection proscrite +Recherche en culture pour le Neisseria gonorrhoeae si PCR positive	OUI (GARDE BAC)	Hybridation moléculaire (PCR)	DR	J0-J3
ECBU (EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES)	Flacon stérile sans conservateur 	2H à 15°C-25°C 24H à 2°C-8°C	Volume minimum souhaitable : 2 MI Préciser date et heure de prélèvement Préciser le traitement antibiotique en cours ou prescrit	OUI (GARDE BAC)	Cytologie urinaire automatisée / culture	DR	J1-J4
	Flacon stérile avec conservateur 	24H à 15°C-25°C	Tube avec conservateur A remplir jusqu'au trait impérativement Noter date et heure de transfère dans tube boraté	OUI (GARDE BAC)	Cytologie urinaire automatisée / culture	DR	J1-J4

PRELEVEMENTS DE SELLES - MICROBIOLOGIE ET CYTOLOGIE

EXAMEN	MATEIREL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
COPROCULTURE RECHERCHE DE BACTERIES Et/ou RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Flacon stérile 	Pour culture : 2H à 15°C-25°C 48H à 2°C-8°C	Bébé : traitement possible d'un échantillon de selles provenant de la couche à transférer dans le flacon stérile Transmettre le flacon stérile + Fecalswab Noter date et heure de transfère dans le fecalswab	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + culture + PCR : <i>Salmonella spp</i> , <i>Campylobacter spp (jejuni et coli)</i> , <i>Shigella spp</i> , <i>E.coli entero invasif</i> gène de <i>Shiga-toxines</i> , <i>EPEC</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Plesiomonas shigelloides</i> , <i>Vibrio</i> PCR : Clostridium difficile Toxine B	DR	PCR J0-J1 Cultures J1-J4
	Ecouvillon milieu de transport (fecalswab) 	Pour culture : 48H à 15-25°C Pour PCR : 48H à 15°C-25°C 5 jours à 2°C-8°C					
SANG DANS LES SELLES	Flacon stérile 	72H à 2°C-8°C	Recherche à faire sur 3 selles différentes de préférence 3 jours de suite	OUI	Immunochromatographie	DR DC	J0

PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE

EXAMEN	NATURE ECHANTILLON	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
BACTERIOLOGIE GENERALE	Prélèvements endocervicaux et vaginaux ou par auto-prélèvement	 Ecouvillon ESWAB	48H à 15°C-25°C *fiche technique ESWABR1	Préciser si contexte ante-partum ou post-partum	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + Culture	DR	J2-J4
STREPTOCOQUE B						Culture	DR	J1-J2
MYCOPLASMES (PCR)			5 jours à température ambiante (20-25°C) pour PCR 1 semaine à + 4°C		OUI (GARDE BAC)	PCR	DR	J0-J3
CHLAMYDIAE TRACHOMATIS (PCR)								
NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOQUE) (PCR)								
TRICHOMONAS VAGINALIS (PCR)								
VAGINAL PANEL (PCR)								
BACTERIOLOGIE GENERALE	Prélèvement urétral	 Ecouvillon fin (ESwab à bouchon orange) avec milieu transport :	48H à 15°C-25°C	La recherche de <i>Chlamydiae trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , et de mycoplasmes urogénitaux est faite sur 1 ^{er} jet d'urines dans un pot stérile.	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + Culture	DR	J2-J4
HPV (PCR)	Prélèvements endocervicaux et vaginaux ou par auto-prélèvement	 Milieu eNAT Ou Milieu cytologie	90 Jours à 2 à 8 °C 90 jours à 15-25 °C	En cas de PCR HPV positive, un prélèvement de cytologie est à réaliser pour confirmation	NON	PCR	DR	J7

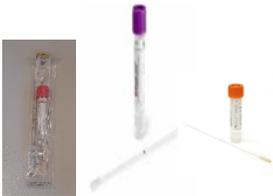
PRELEVEMENTS DE LA SPHERE ANO-RECTALE ET ORO-PHARYNGEE

<p>CHLAMYDIAE TRACHOMATIS (PCR)</p>	<p>Prélèvements ano-rectaux et oro-pharyngés</p>	 Milieu eNAT	<p>Oro-pharyngé : 3 Jours à +4°C Ano-rectaux : 2 Jours à +4°C OU CONGELER 1 mois à – 20°C</p>	<p>Si prélèvement vendredi après 12h → CONGELER</p>	<p>NON</p>	<p>PCR</p>	<p>DR</p>	<p>J0-J3</p>
<p>NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOQUE) (PCR)</p>								

PRELEVEMENTS DE SPERME ET TEST DE HUHNER

EXAMEN	NATURE ECHANTILLON	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
RECHERCHE D'EJACULATION RETROGRADE	Urines +ou - Sperme	Flacon stérile sans conservateur	<1H à 15°C-25°C	Protocole d'alcalinisation des urines la veille et le matin du prélèvement. Sur RDV au laboratoire (site DR)	NON	Examen direct	DR DC	J1-J4
SPERMOGRAMME SPERMOCYTOGRAMME TEST DE MIGRATION-SURVIE (TMS)- SOUS GOUTTE VASECTOMIE	Sperme			Sur RDV au laboratoire (site DR/DC)				
SPERMOCULTURE	Sperme	Flacon stérile sans conservateur 	≤ 2H à 15°C-25°C	Sans RDV, ne pas uriner 2 h avant l'examen	NON	Examen direct + culture	DR DC	J2-J4
TEST DE HÜHNER (TEST POST-COÏTAL)	Glaire cervicale	Aspiglaire	≤ 1H à 15°C-25°C	Sur RDV au laboratoire (site DR)	NON	Méthode manuelle	DR DC	J0

PRELEVEMENTS DIVERS : MICROBIOLOGIE

EXAMEN	NATURE ECHANTILLON	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
BACTERIOLOGIE GENERALE	Prélèvements cutanéomuqueux	Ecouvillon milieu de transport (ESwab) 	48H à 15°C-25°C	Prélèvements cutanéomuqueux : Plaie, escarre, pus, abcès... Précisez la localisation exacte et les renseignements cliniques	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + culture	DR	J2- J14 pour cultures prolongées
BACTERIOLOGIE GENERALE	Prélèvements ORL			ORL : frottis auriculaire, frottis de gorge, frottis nasal Précisez la localisation exacte et les renseignements cliniques	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + culture	DR	J2-J4
BACTERIOLOGIE GENERALE	Prélèvements oculaires			Prélèvements oculaires : frottis canal lacrymal, frottis annexes palpébrales, sécrétions lacrymales, pus conjonctival...	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + culture	DR	J2-J4
BACTERIOLOGIE GENERALE	Prélèvements de liquide articulaire et synovial		2H à 15°C-25°C 24H à +4°C	Minimum souhaitable 3 ml de liquide articulaire Associé un Flacon d'Hémoculture anaérobie Proscrire les tubes HL et les Eswab Précisez la localisation exacte et les renseignements cliniques	OUI (GARDE BAC I)	Examen direct + culture	DR	J0 -J1 recherche de cristaux et examen direct + J2/J4 + J7 pour cultures prolongées

PRELEVEMENTS DIVERS : MICROBIOLOGIE

EXAMEN	NATURE ECHANTILLON	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
BACTERIOLOGIE GENERALE	Pièces opératoires, biopsie, pus, abcès profond IOA infection ostéo articulaire Dispositifs intra vasculaire (KT, Pace Maker, Chambre implantable)	Flacon stérile sans conservateur  + Ecouvillon ESWAB  + 	2H à 15°C-25°C Si > 2H : jusqu'à 24H à 2°C-8°C 48h à 15-25°C	Précisez la localisation exacte et les renseignements cliniques Pour les pièces opératoires, KT uniquement un pot stérile Pour les infections ostéo-articulaires faire minimum 3 prélèvements maximum 6 prélèvements si possible associé des flacons d'hémocultures anaérobies Respecter un délai de 15 jours après antibiothérapie	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + culture	DR	J0 (examen direct) + J2/J4 + J14 pour cultures prolongées
BACTERIOLOGIE GENERALE	Prélèvements péri-nataux	Ecouvillon milieu de transport 	48H à 15°C-25°C	/	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + culture	DR	J2-J4
BACTERIOLOGIE GENERALE	Ponction de collection fermée, Pus, Bartholinite, Hématome...	Flacon stérile sans conservateur ou Seringue bouchée SANS aiguille ou  ESWAB	2H à 15°C-25°C Si > 2H : jusqu'à 24H à 2°C-8°C ESWAB : 48H à 15°C-25°C	Précisez la localisation exacte et les renseignements cliniques Prélèvement Bartholinite recherche de Chlamydiae sous-traité	OUI (GARDE BAC)	Examen direct + culture	DR	J2/J4 + J14 pour cultures prolongées

PRELEVEMENTS DIVERS : BMR (Bactéries Multi Résistantes)

EXAMEN	NATURE ECHANTILLON	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
ERG-EPC-BLSE-ABRI-ABMR-PARC	Frottis rectal	Ecouvillon milieu de transport	48H à 15°C-25°C	/	OUI (GARDE BAC)	Culture	DR	J2/J4
SARM	Nasal		48H à 15°C-25°C	Prélèvement cutané : périnée, aisselles, lésions chroniques, etc...	OUI (GARDE BAC)	Culture	DR	J1/J2 pour SARM
BLSE-EPC-ABMR-PARC	Cutané, Gorge, Pharynx							J2 /J3
BLSE	Urines	Flacon stérile sans conservateur  Ou avec conservateur 	Sans conservateur : 2H à 15°C-25°C Avec conservateur : 48H à 15°C-25°C	/	OUI (GARDE BAC)	Culture	DR	J2 /J4
ABMR-PARC	Aspiration trachéale Gorge	Flacon stérile sans conservateur 	2H à 15°C-25°C Si > 2H : jusqu'à 24H à 2°C-8°C	Ex liquide biologique : aspiration trachéale	OUI (GARDE BAC)	Culture	DR	J2/J4

PRELEVEMENTS DIVERS : MICROBIOLOGIE

EXAMEN	NATURE ECHANTILLON	MATERIEL	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT (délai maximal entre le moment du prélèvement et le dépôt au laboratoire)	PRECONISATIONS PARTICULIERES COMMENTAIRES	EXAMEN REALISE EN GARDE ?	METHODE DE MESURE	LIEU DE REALISATION	DELAI DE RENDU
RECHERCHE COVID-19 (SARS-COV-2)	Prélèvements nasopharyngés	 Milieu de transport avec écouvillon fin	48H à +4°C	/	OUI (GARDE BAC)	PCR	DR	J0/J1
		écouvillon fin + tube à hémolyse 	45 min à 15°C-25°C	Utiliser un tube propre STERILE étiqueté et scellé hermétiquement. Noter l'heure de prélèvement sur le tube	NON	Test antigénique	DR-DC	J0
RECHERCHE VIRUS RESPIRATOIRES DE LA GRIPPE (INFLUENZA A ET B) ET VRS	Prélèvements nasopharyngés	 Milieu de transport	48H à +4°C	/	OUI	PCR	DR	J0/J1